



**ООО «ГК ПАЛЬМА»**

Россия, 108809, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Внуково, д. Толстопальцево, ул. Советская, д. 4, стр. 1, тел: +7 (495) 921-3719, [www.palma-med.ru](http://www.palma-med.ru)

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛУКОЛЬЦА АДГЕЗИВНОГО СОФАЛЬ**

ТУ 32.50.13-012-83228278-2019, РУ № РЗН 2015/3322 от 22.11.2024,  
РУ № РЗН 2015/3320 от 22.11.2024, РУ № РЗН 2015/3324 от 21.11.2024

Полукольца СОФАЛЬ предназначены для дополнительной фиксации и продления срока использования кало- и уроприемников.



**рис. 1**



**рис. 2**



**рис. 3**



**рис. 4**

## **КАК НАКЛЕИТЬ ПОЛУКОЛЬЦО СОФАЛЬ**

Приклейте однокомпонентный кало-, урприемник или пластину БИНАЦЕЛ® (рис. 1). Удалите защитное покрытие с полукольца СОФАЛЬ (рис. 2). Наклейте полукольцо СОФАЛЬ внахлест на кольцо однокомпонентного кало- или урприемника или пластины БИНАЦЕЛ® (рис. 3). При необходимости наклейте второе и третье полукольцо таким же образом (рис. 4).

**ВНИМАНИЕ!** Наклеивание нового полукольца СОФАЛЬ допускается на оставшиеся на коже фрагменты липкого слоя.

## **КАК СНЯТЬ ПОЛУКОЛЬЦО СОФАЛЬ**

Снимайте полукольцо СОФАЛЬ вместе с кало-, урприемниками или пластинами БИНАЦЕЛ®, осторожно отслаивая липкий слой от кожи, придерживая при этом кожу рукой.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса Б.

**ВАЖНО!** Не выбрасывайте использованное полукольцо в канализацию.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** хранить при температуре от +5 °С до +30 °С вдали от солнечных лучей.

**ВАЖНО!** Не храните полукольца СОФАЛЬ в холодильнике.